

Ricarica. Rilassati.  
Ripeti.





# Ricarica. Rilassati. Ripeti.

Grazie per aver scelto il sistema acustico ricaricabile **Starkey®+ ZPower®**.  
In questo manuale troverai istruzioni e utili suggerimenti per il tuo nuovo apparecchio acustico ricaricabile.

## Contenuto

Il tuo apparecchio acustico ricaricabile è confezionato in due scatole. Funziona sia con le pile ricaricabili ZPower che con le pile tradizionali. Ti forniamo entrambe le opzioni.

### La confezione dell'apparecchio acustico contiene:

- Apparecchio acustico (pile non inserite)
- Custodia
- Spazzolino per la pulizia
- Paracerume Hear Clear™
- Panno in microfibra
- Pile Zinco Aria 312 (se non usate le pile ricaricabili)
- Custodia da viaggio
- Manuale operativo RIC (Ricevitore nel canale)

### La confezione delle pile ricaricabili ZPower contiene:

- Caricatore ZPower
- Pile ricaricabili ZPower (in colore oro e argento)
- Adattatore USB a muro
- Manuale operativo

## Micro RIC 312t

### Il tuo apparecchio acustico è composto da:

1. Apparecchio acustico
2. Tubetto di connessione
3. Ricevitore
4. Microfono
5. Pulsante (controllo del volume)
6. Sportello Pila (acceso/spento), numero di serie, indicatore lato destro/sinistro (rosso per lato destro-blu per lato sinistro)


### Il tuo apparecchio acustico è identificato da:

7. Aletta di Ritenzione
8. Nome del produttore e modello
9. Indicatore lato destro/sinistro

### Comfort Fit Solution:

10. Auricolare Instant Fit
11. Auricolare su misura (opzionale)
12. Auricolare su misura per matrici potenti (opzionale)

## Caratteristiche, controlli e identificazione

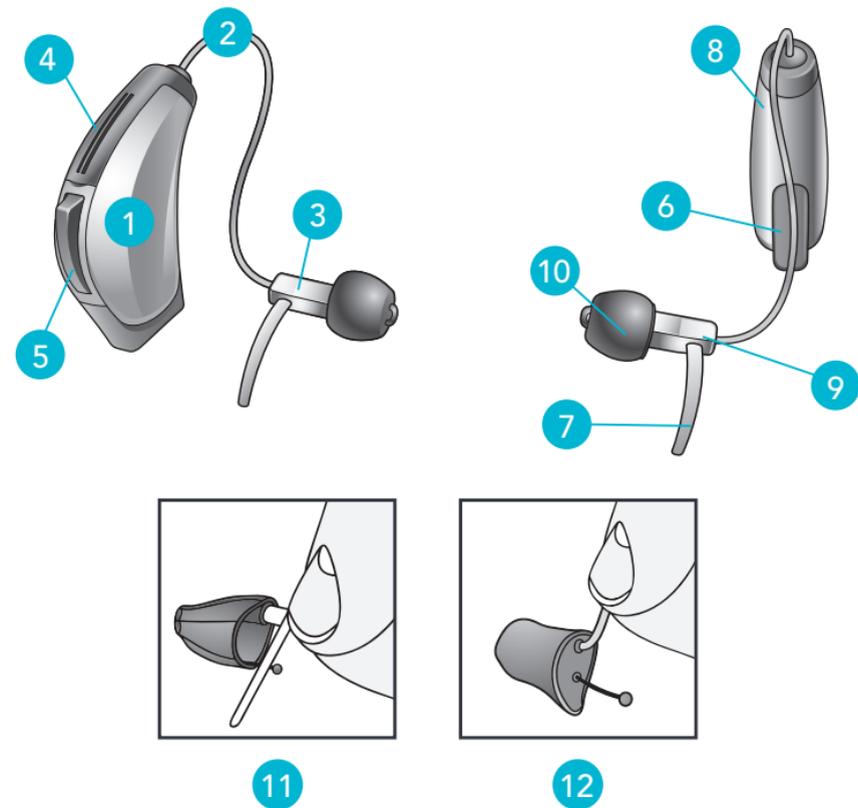

## Come installare le pile ZPower


Il tuo apparecchio acustico funziona a pile. Puoi usare sia le batterie ricaricabili ZPower sia le pile Zinco Aria 312. Le pile ZPower sono fornite cariche e pronte all'uso.

### Per inserire o sostituire le pile ricaricabili:


1. Aprire lo sportello pila
2. Inserire la pila nell'apposito vano (lato oro sopra)
3. Chiudere lo sportello pila

### Consigli utili


- **NON FORZARE MAI LA CHIUSURA DELLO SPORTELLLO PILA:** potrebbe danneggiarsi seriamente. Se lo sportello pila non si chiude correttamente, verificare che la pila sia inserita in modo appropriato.
- Si raccomanda di smaltire le pile scariche negli appositi contenitori.

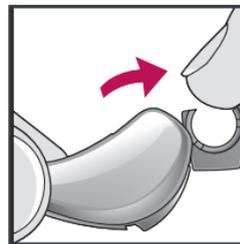

1

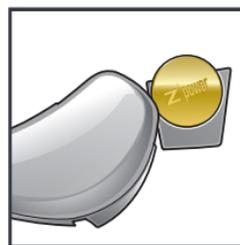

2

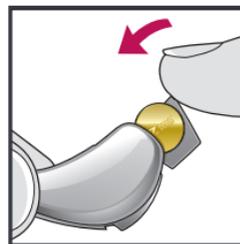

3

## Manutenzione

Una corretta manutenzione farà durare le pile più a lungo

### Suggerimenti

- Caricate le pile regolarmente prima di utilizzarle.
- Caricate le pile a temperatura ambiente (fra 10°e 40°C).
- Non inserire le pile nel caricatore se questo non è alimentato, perché questo farà scaricare le pile.
- Rimuovi le pile dall'apparecchio acustico se non hai intenzione di usarlo per diversi giorni.
- Le pile ricaricabili durano un anno circa e una volta esaurite possono essere facilmente sostituite dal tuo audioprotesista.


## Come caricare l'apparecchio acustico

Collega il cavo di alimentazione all'adattatore a muro USB e a una presa di corrente. Appena inserito, entrambe le spie del caricatore diventeranno verdi.

### Caricare l'apparecchio acustico

#### 1. Inserisci gli auricolari nel caricatore

Tenendo gli auricolari dalla base (non dal cavetto), inseriscili nell'apposito spazio nel caricatore. Entrambi i cavetti e i ricevitori devono essere rivolti dalla stessa parte. Se gli auricolari sono stati inseriti correttamente, entrambe le spie verdi lampeggeranno. Attenzione: gli auricolari si spengono automaticamente una volta inseriti nel caricatore. Non è necessario aprire lo sportello pila.

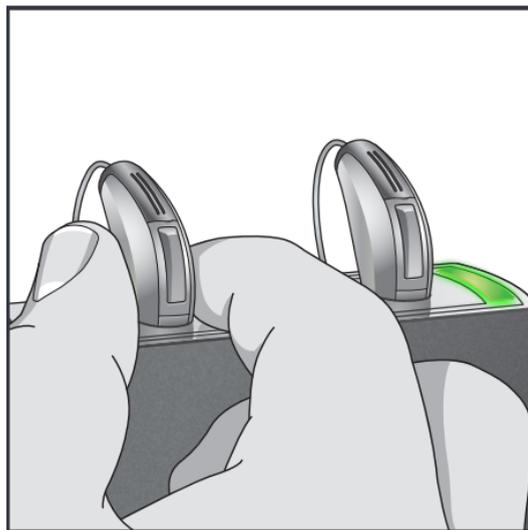




#### 2. Aspetta 3-4 ore

Quando le spie verdi lampeggiano, significa che l'apparecchio acustico si sta ricaricando. Quando smettono di lampeggiare e la spia verde è fissa, significa che l'apparecchio acustico è completamente carico.

#### 3. Indossa l'apparecchio acustico

Prendi gli auricolari dalla base e NON dal cavetto. Una volta rimossi dal caricatore, gli auricolari si accenderanno automaticamente.

Puoi rimuovere gli auricolari prima che siano completamente carichi, ma non dureranno come con la carica completa. Si consiglia di lasciare sempre gli auricolari in carica quando non sono utilizzati. Non si caricheranno mai troppo, quindi ti raccomandiamo di caricarli sempre a fine giornata.

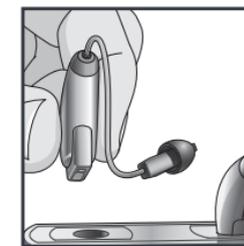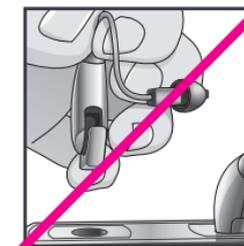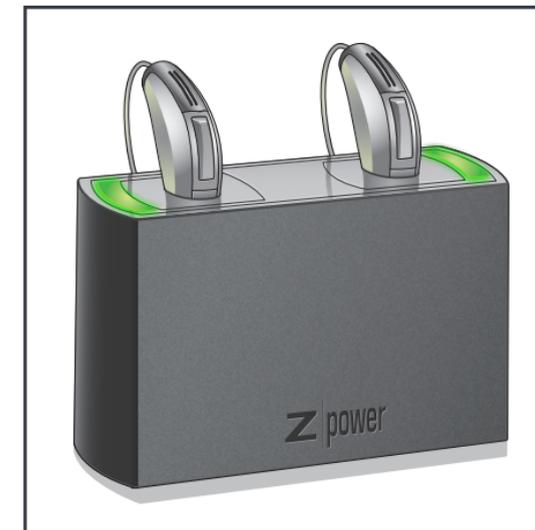

## Guida alla Soluzione dei Problemi

Spie del caricatore	Possibile causa	Soluzione
Non si accendono	Gli apparecchi non sono inseriti correttamente nel caricatore oppure il caricatore non è collegato correttamente.	Rimuovi gli apparecchi e inseriscili nella posizione corretta. Verifica che il cavo USB sia collegato correttamente all'adattatore USB. Verifica che l'adattatore USB funzioni collegandolo ad un altro dispositivo.
Una o entrambe le spie sono rosse	La pila non si carica.	Controlla che la pila sia una pila ZPower ricaricabile.
Entrambe le spie sono rosse e lampeggiano	L'apparecchio si è surriscaldato. L'operazione di ricarica viene sospesa finché non viene raggiunta la temperatura adeguata.	Metti il caricatore ad una temperatura ambiente fra 10°C e 40°C.
<b><i>Se il problema persiste consulta il tuo audioprotesista.</i></b>		

Assicurati che le pile siano inserite correttamente (lato oro sopra).



